







Datenblatt Filtrierende Atemschutzmaske

CPA Model CV19 – DITF

- Name: CPA („Corona SARSCov-2-Virus Pandemie Atemschutzmaske“)
CPA Model CV19 – DITF
- Hinweis: CPA-Model CV19 – DITF ist auf dem deutschen Markt ausschließlich zum Zwecke des Infektionsschutzes für die Dauer der Corona Pandemie bestimmt
- Prüfstatus: CPA-Model CV19 wurde gemäß **Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Schnelltest Verfahren Rev.02 gem. ZLS-Verfahren vom 29.05.2020** geprüft
- Hersteller: **DITF Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf**
Körschtalstraße 26
D - 73770 Denkendorf
- CE-Kennzeichnung: keine
- Packungseinheit: 20 Stck.
- Textilkennzeichnung: 100% Polypropylen
- Beschreibung: 3-lagige CPA Spinnvlies – Meltblowlage - Spinnvlies
- CPA gemäß Verordnung zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Produkten des medizinischen Bedarfs bei der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten Epidemie (Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung - MedBVSV)
§ 9 Bereitstellung von persönlichen Schutzausrüstungen im Kontext der COVID-19-Bedrohung
- CPA Model CV19 – DITF wurde von der zuständigen Marktüberwachungsbehörde nach § 24 Absatz 1 ProdSG als verkehrsfähig anerkannt als persönliche Schutzausrüstung nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung – MedBVSV (nicht nach der Verordnung (EU) 2016/425).

Gebrauchsanweisung zum Anlegen der Maske CPA-Model CV19 - DITF

Reinigen Sie sich, wenn möglich, die Hände vor der Benutzung einer Atemschutzmaske.

1.		Bringen Sie ggf. Ihr Namensetikett gut sichtbar am Gummiband an.
2.		Maske öffnen und Nasenclip mit einem Finger vorformen.
3.		Maske anlegen , dabei zuerst mit dem Kinn einsteigen und danach über die Nase ziehen. Mit der anderen Hand ziehen Sie das Halteband über den Kopf.
4.		Halteband richtig positionieren . Das Gummiband sollte oberhalb der Ohren platziert sein, gut anliegen und nicht drücken.
5.		Sitz der Maske optimieren , dass die Maske dicht und fest sitzt, jedoch nicht zu weit über das Kinn gezogen wird, damit durch eine möglichst große aktive Filterfläche geatmet wird.
6.		Nasenbügel an die Nasenform anpassen .
7.		Dichtsitz der Maske prüfen – Bei Luftaustritt erneut anpassen.
8.		CPA-Model CV19 – DITF ist zum Einmalgebrauch bestimmt.
9.		Maske im Fall der Durchfeuchtung wechseln
10.		Nach Gebrauch CPA-Model CV19 – DITF am Halteband fassen, dieses über den Kopf streifen und die Maske so abnehmen und entsorgen , dass bei möglicherweise vorliegender Kontamination mit Krankheitserregern diese nicht übertragen werden.

